

KERTAKÄYTTÖINEN KYLMÄPUSSI

KÄYTTÖOHJEET:

Riko pussin sisällä oleva vesipussi puristamalla pussia molemmilla käsillä. Ravista sen jälkeen pussia, jotta sisältö sekoittuu. Laita pussi kohdealueelle.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Hematomat, revähdykset, loukkaantumiset, hypertermia ja muut kylmähoitoa vaativat tapaukset. Kylmäpakkauksella on hetkellinen puuduttava ja verisuonia supistava vaikutus.

VAROITUKSET:

Vain ulkoiseen käyttöön; kertakäyttötuote. Tuotetta ei voi käyttää uudelleen. Älä käytä, jos pussi on vahingoittunut. Älä riko pussia ja estä pussin sisällön vuotaminen. Pussin sisältö aiheuttaa tahraantumista ja ärsytystä (jos sisältö pääsee kosketukseen ihon kanssa, huuhteile ihoa vedellä 15 minuutin ajan), ja se on vahingollinen (jos sisältöä niellään, ota heti yhteyttä ensiapuun). Säilytys huoneenlämmössä ja poissa lasten ulottuvilta sekä kaukana lämmönlähteistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. Älä pakasta pussia, äläkä käytä vahingoittuneella iholla. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on sydän- ja verisuonitauteja, verenkiertoelimestön tauteja, diabetes ja/tai ihoherkkyyttä (Raynaudin syndrooma), jos tuotetta käyttävät lapset tai vanhukset tai jos et ole varma miten tuotetta käytetään tai oireet eivät häviä. Älä käytä vauvoille tai alle 3-vuotiaille lapsille. Jos lääkintälaitteen käytöstä aiheutuu vakavia terveyshaittoja, pyydämme ilmoittamaan niistä tuotteen valmistajalle ja kotimaasi viranomaisille.

AINESOSAT: urea, ammoniumkloridi ja vesi.



KL Sport Oy
Valuraudantie, 17 00700 Helsinki, Finland
Tel. +358 9 6860 760 - e-mail: klsport@klsport.fi
www.klsport.fi



Dispotech Srl
Via al piano 29, 23020 Gordona (SO)Italy
Tel. +39 0343/36711 - e-mail: info@dispotech.it

MADE IN
ITALY



Rev.12 04/2024 Ed. 02 09/2026



ELEVACE
FOR ACTIVE LIFE

INSTANT
ICE PACK



Easy to activate



Cold & effective



Quickly relieves pain



ENGÅNGS KYLPÅSE

INSTRUKTIONER:

Tryck med båda händerna mot mitten tills den invändiga bubblan går sönder. Skaka påsen för att blanda innehållet. Applicera på det drabbade området.

AVSEDD ANVÄNDNING:

Blödningar, stukningar, trauma, hypertermi och i samtliga fall där kryoterapi och användning av kyla krävs. Kylförpackningen har en tillfällig bedövande och kärlsammandragande effekt.

VARNING:

Engångsprodukt endast för externt bruk. Produkten fungerar inte längre när den har använts. Använd inte om förpackningen är skadad. Gör inte sönder påsen och försök inte att ta ut innehållet. Innehållet skapar fläckar, irriterar (vid kontakt skölj området med vatten i 15 minuter.), är skadligt (vid förtäring, kontakta omedelbart en läkare). Förvara i rumstemperatur utom räckhåll för barn, borta från värme och brandfarliga material. Använd inte på skadad hud. Kontakta din läkare vid hjärt- och kärlsjukdomar, cirkulationssjukdomar, diabetes och/eller okänslig hud (Raynauds fenomen), vid användning hos barn och äldre, om du är osäker på behandlingen som ska utföras och om symtomen kvarstår. Använd inte på spädbarn och barn under 3 år. I händelse av allvarliga säkerhetsincidenter som inträffar under användningen av detta medicinska hjälpmedel, rapportera detta till tillverkaren samt till den behöriga myndigheten i ditt land.

INNEHÅLL: urea, ammoniumklorid och vatten.



6 417221 272934

FL54MDRIMPKLSPE02R